

## Benutzerinformationen zur filtrierenden Halbmaske LK-003

### [ Produkttyp und Artikelnummer ]

Produkttyp: Filtrierende Halbmaske FFP2 NR  
Artikelnummer : LK-003

### [ Material ]

Produktmaterial: Vliesstoff 67%, schmelzgeblasener Anteil 33%.  
Hauptbestandteile: Schmelzgeblasenes Polypropylen 95% - Farbanteil 5%,  
Vliesstoff Polypropylen 98% - Farbanteil 2%.

### [ Lagerbedingungen ]

Lagertemperaturbereich: -30°C ~ +40°C  
relative Luftfeuchtigkeit <80%

In einer trockenen, belüfteten, nicht korrosiven Umgebung, fern von Feuerstellen und brennbaren Materialien aufbewahren.

Produkt vor direkter Sonnenstrahlung schützen.

### [ Warnhinweise ]

- Vor Verwendung:  
Prüfen Sie, ob die Verpackung unbeschädigt ist.  
Überprüfen Sie die beiliegenden Verpackungshinweise.  
Überprüfen Sie das Produktions- und Verfallsdatum.  
Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt innerhalb des Gültigkeitszeitraums verwenden.
- Dieses Produkt wurde in einer staubfreien Umgebung hergestellt und verpackt. Wenn die Verpackung beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht.
- Diese Maske ist ein Einwegprodukt.
- Benutzen Sie keine beschädigten Masken, da die Filtereffizienz beeinträchtigt sein kann.
- Wenn die Konzentration von Feinstaub in der Luft größer als 500µg /m<sup>3</sup> ist, sollte die Maske nicht verwendet werden.
- Die Maske darf nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung verwendet werden.
- Schutzmasken sollten rechtzeitig ersetzt werden, eine langfristige Verwendung wird nicht empfohlen.
- Wenn während des Tragens Beschwerden oder unerwünschte Reaktionen auftreten, wird empfohlen, die Masken nicht weiter zu verwenden.
- Personen, die allergisch gegen Vliesstoffe sind, sollten die Maske mit Vorsicht verwenden.
- Nachdem das Produkt verwendet wurde, sollte es ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Körperbehaarung und Barthaare können zu Dichtigkeitsproblemen führen und die Filterleistung reduzieren. Achten Sie auf einen enganliegenden Sitz der Maske.
- Verwenden Sie die Maske nicht, wenn die Sauerstoffkonzentration in der Luft weniger als 19% beträgt.

### [ Benutzungshinweise ]

- Das Produkt sollte nach Gebrauch entsorgt und kann nicht gewaschen oder wiederverwendet werden.
- Versuchen Sie nach der Verwendung der Maske, diese flach und geschützt aufzubewahren.
- Die Nasenrückenklammer der Maske sollte nicht häufig gefaltet werden, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Kindern unter 3 Jahren wird aufgrund ihrer geringen Lungenkapazität nicht empfohlen, die Maske zu tragen.



- Entnehmen Sie die Maske der Verpackung.
- Platzieren Sie den Nasenclip oben und ziehen Sie die Maske zunächst über das Kinn.
- Befestigen Sie die beiden Halteschlaufen hinter den Ohren.
- Passen Sie den Nasenclip mit den Fingern an (wie abgebildet).
- Überprüfen Sie die Maske auf korrekten Sitz und regulieren Sie ggf. nach.

**Positiver Drucktest:** Drücken Sie vorsichtig mit beiden Händen auf die Maske und atmen Sie dann leicht aus. Die Luft darf nicht aus dem Rand der Maske austreten.

**Negativer Drucktest:** Drücken Sie vorsichtig mit beiden Händen auf die Maske und atmen Sie dann ein. Die Mitte der Maske sollte leicht nach innen gewölbt sein.

### [ Herstellungsdatum ]

Siehe Verpackungskennzeichnung/Hinweiszettel

### [ Haltbarkeit ]

Das Produkt ist 2 Jahre nach Produktionsdatum (siehe Hygienebeutel) verwendbar.


### [ Verpackungseinheiten ]

5 Stück im Hygienebeutel, 50 Stück im Produktkarton, 600 Stück im Umkarton  
Dieser Zettel ist zur Vervielfältigung freigegeben.

### [ Konformität ]

Der beschriebene Gegenstand der Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen harmonisierten Normen: PSA-Verordnung (EU) 2016/425  
EN 149:2001+A1:2009

Folgende benannte Stelle führte die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durch und stellte die EU-Baumusterprüfbescheinigung aus: UNIVERSAL SERTİFİKASYON HİZMETLERİ VE GÖZETİM HİZMETLERİ GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (CE2163)

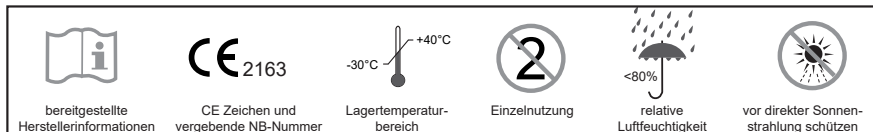

## Wichtiger Hinweis:

Die Schutzmaske LexusLance „LK-003“ sind CE-zertifiziert bei der benannten Stelle „NB2163“!  
Zertifikate und Prüfberichte zum Download unter: [www.lexuslance.com](http://www.lexuslance.com) / [www.david-comm.de](http://www.david-comm.de)

Hersteller: Huizhou Lexuslance Technology Co.,Ltd  
Adresse: Plant A, Phase I, Eling Xiechang Company, Wuyi Village, Chenjiang Office,  
Zhongkai High Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province, China  
Postcode: 516001

Einführer: David Communication e.K.  
Gewerbestr. 10 21391 Reppenstedt  
[www.david-comm.de](http://www.david-comm.de) [info@david-comm.de](mailto:info@david-comm.de)

Telefon  
+86-0752-3202188

Tel. +49-4131-68488-0  
Fax +49-4131-68488-29